




# キーパーのご使用にあたって!


## 「キーパー」の安全・簡単針外し機能の使い方

### ● ロック式注射器


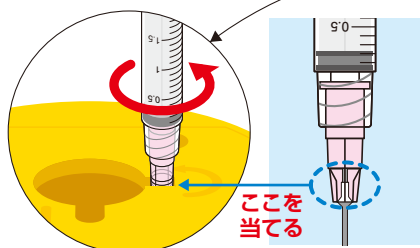


注射針の針元を型に当てて、**左に回す**と簡単に外れ、容器内に投入できます。

### ● 通常の注射器

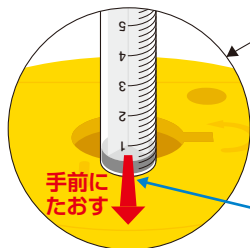

注射器をセットして**たおす**だけで注射針が容器内に投入されます。  
\*引っ掛けて引き抜くではありません。

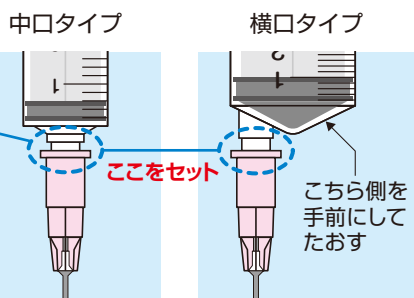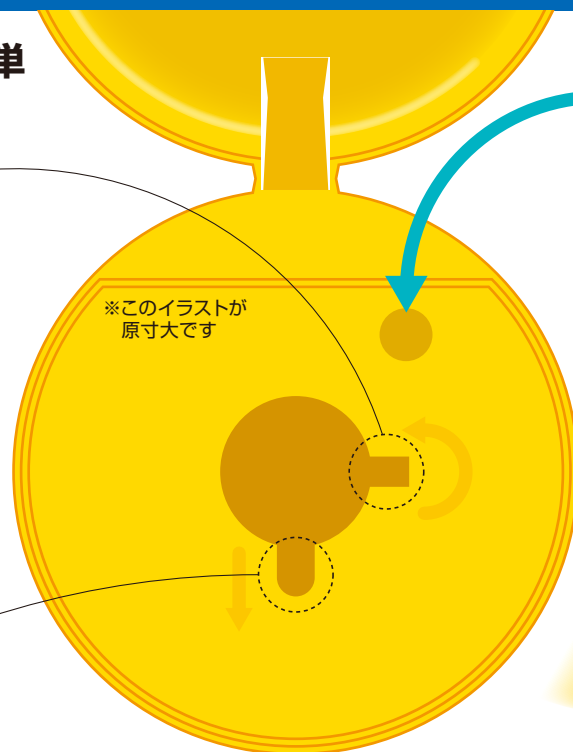


## ペン型注射器用 リキャップホール®

インスリン注射などに使うペン型注射器のリキャップを補助する機能です

### ● 使い方

- ① 針ケースをリキャップホール®に立てます。(保護シールは完全に取り外して下さい。)
- ② 注射が終わったら注射器を**まっすぐ**針ケースに入れます。
- ③ 注射器を引上げるとリキャップ完了です。
- ④ 針ケースを指で保持し、注射器本体を反時計方向に回してから取り外します。

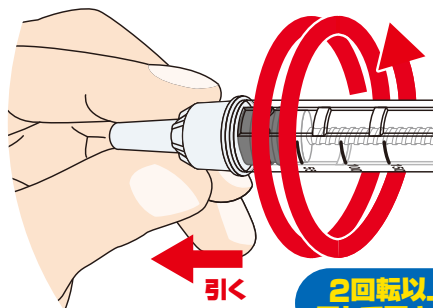

## 取扱上の注意

- 破損・変形したものは、ご使用にならないで下さい。
- ご使用時は、必ず両手でお使い下さい。
- ご使用時以外は、必ずフタをして下さい。
- キーパーを足下に置かないで下さい。
- 液体は入れないで下さい。
- 注射針投入口に指などを入れないで下さい。
- オートクレープなどの高温処理はしないで下さい。
- 注射針が入りづらくなったら使用限度です。新しいキーパーにお取替下さい。
- 無理に押込まないで下さい。

- 分解するなどして、廃棄物を別の容器に移し替えたりしないで下さい。
- 再使用はしないで下さい。
- キーパーのフタは、完全にロックできない構造になっています。最終処理に出す時には、黄色のバイオハザードマークのついた大型容器へそのまま廃棄して下さい。また、すぐに大型容器に廃棄しない場合などは、必ずビニールテープなどでフタをしっかりと封印して下さい。

最終処理は、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に準じた処理をして下さい。

## キーパー 仕様

【サイズ】 直径7.5cm、高さ13cm  
【梱包】 50個/箱

日本製



ラベル

PP

■ キーパー



## 有限会社 グツツール

〒567-0031 大阪府茨木市春日2丁目3番7号  
TEL.072-627-5518 FAX.072-624-2271  
e-mail:office@goodtool.biz  
ホームページ www.goodtool.biz

ご注文専用FAX.  
☎ 0120-881-768